



scandinaviannonwoven

BRUKSANVISNING

SVENKO Mjukfibermadrass



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2013LK0003 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





scandinaviannonwoven

Säkerhetsföreskrifter

- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt beskrivningen nedan.
- Får ej användas i närheten av eller i kontakt med eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
- Placera/använd madrassen så att den inte blir skadad eller klämd.
- Kontrollera alltid att madrassen har rätt storlek.

CE-Märkning

SVENKO mjukfibermadrass är en medicinteknisk produkt, klass 1 och den är CE-märkt enligt **MDR 2017/745**. CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter och Läke-medelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.

Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter.

Observera att om en allvarlig incident med koppling till denna medicintekniska enhet inträffar, och denna incident påverkar användaren eller patienten, ska användaren eller patienten rapportera denna allvarliga incident till Scandinavian Nonwoven AB så snart det är möjligt.

Produktbeskrivning

SVENKO Mjukfibermadrass är lämpad att använda i vård- och omsorgsmiljö och även i hemmiljö. Madrassen är tillverkad av 3 kg glatta silikoniserade polyesterhålfiber. Fiberns glatta egenskaper motverkar risken för skjuv.

Uppackning

SVENKO Mjukfibermadrass levereras ihoprollade i återvinningsbar plast.

1. Innan uppackning av madrassen, kontrollera att den ej är skadad.
2. Avlägsna plasten försiktigt, använd inget vasst föremål vid öppnandet för att undvika skada på madrassen.
3. Placera madrassen i plant för att den ska återhämta sin normala ursprungliga form. Det kan ta upp till någon dag innan madrassen återtagit sin fulla bredd, längd och höjd. Dock kan madrassen användas direkt efter uppackning om behov skulle föreligga.



scandinaviannonwoven

Användning

SVENKO Mjukfibermadrass placeras ovanpå en befintlig madrass. Madrassen fästs sedan med hjälp av resårbanden som finns i varje hörn.

SVENKO är avsedd för användare upp till 120 kg. Madrassen bör vändas och "skakas" med jämna mellanrum för att förlänga livslängden.

Rutinkontroller

För att kontrollera att madrassen är funktionsduglig skall följande test utföras:

- Placera madrassen mellan handflatorna och låt madrassen glida fram och tillbaka.
- Det skall kännas glatt mellan händerna och madrassen skall glida utan problem.
- Om fibermaterialet är förstört, t.ex. genom felaktig torktumling, fastnar madrassen mellan handflatorna – glidfunktionen är förstörd.
- En madrass som inte klarar glidtestet skall kasseras.

Tekniska data

Fyllning	Silikoniserad polyesterhålfiber
Tyg	Microfiber 115g/m ²
Förpackning	Rullpackad i klar plast
Färg	Vit
Rekommenderad brukarvikt	0-120 kg

Märkning

På SVENKO Mjukfibermadrass finns etikett placerad med leverantörsnamn, anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer och tillverkningsdatum. Madrassen är Öko-tex certifierad.

Brandhärdighet

Madrassen är testad och godkänd enligt EN 597-1.

BRANDVARNING

Cigaretter, tändare, öppna lågor och värmeelement i exempelvis elektriska kaminer (och andra elektriska apparater) är brandrisker som kan antända sänglinne, filter och kläder. Det är mycket viktigt att dessa brandrisker inte förekommer i närheten av madrassen.

OBS! Det är mycket farligt att röka i sängen.



scandinaviannonwoven

Storlekar

80 x 200 cm	Art.nr: LUL080L
90 x 200 cm	Art.nr. LUL090L
105 x 200 cm	Art.nr. LUL105L
120 x 200 cm	Art.nr. LUL120L

Rengöring

Madrasen tvättas i 70 °C och kan torktumlas på låg värme till stryktorr. Torkas madrassen vid för hög temperatur förstörs fibermaterialet.

Garanti

Produkten har 2 års garanti, den avser tillverkningsfel.

Destruering

Madrasen samt emballage sorteras som brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Vid reklamation ska detta rapporteras direkt till Scandinavian Nonwoven AB.

Vid returnering av reklamerad vara, ska detta ske enligt våra instruktioner och får först göras när reklamationen är anmäld till Scandinavian Nonwoven AB.

Tillverkare

Scandinavian Nonwoven AB

Kontakt:

Telefon: 044-203960

E-post: info@nonwoven.se

Support:

Måndag – fredag

08.00 – 16.30

Postadress:

Alevägen 1

291 62 Kristianstad